

ざし鍼

【禁忌・禁止】

妊婦、悪性腫瘍、出血性疾患、金属アレルギーのある患者には適用しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に適用すること。

【保管方法及び有効期間等】


直射日光及び高温・多湿を避けて清潔に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

再使用時は、洗浄・消毒して使用してください。
再使用時は、傷、破損等異状がないことを確認してください。

【形状・構造及び原理等】

1.各部名称

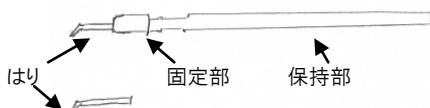

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 前田豊吉商店
〒167-0052 東京都杉並区南荻窪 1-22-15
電話番号 03-3332-7634
製造業者 株式会社 前田豊吉商店

2.原材料

皮膚に接触する部分 : はり…ステンレス

**3.原理

外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、末梢神経を刺激する細長く先の尖った再使用可能な器具であって、滅菌済みを除いた器具をいう。

【使用目的又は効果】

鍼治療に使用すること。

【使用方法等】

- 1.使用前後はアルコール等で消毒してください。
2. はりを固定部に挿入し固定してください。保持部を持ち、はりを皮膚に接触して使用します。
- 3.独特の手技が必要です。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

**・本品は医家向け医療機器であるため、当該手技を熟知したはり師、医師、獣医師等有資格者以外の方は使用できません。

- ・本品は鍼治療用です。鍼治療の目的以外には使用しないでください。
- ・使用に先立ち、製品の破損、変色等の有無を確認し、異常が認められた場合は使用しないでください。
- ・はりを固定部に固定した後、はりが脱落しないことを確認してください。
- ・再使用時は、洗浄・消毒をして使用してください。
- ・皮膚に強く押し付けると傷がつくことがあります。
- ・処分する場合は医療廃棄物として自治体の指示に従ってください。

2.不具合・有害事象

- ・重大な有害事象
本品の使用により以下のような有害事象の可能性があります。
出血、アレルギー反応

3.高齢者への適用

- ・高齢者への適用に当たっては、急激なショック等を与えないよう慎重に刺鍼してください。

4.妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- ・妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用に当たっては、急激なショック等を与えないよう慎重に刺鍼してください。